

牙用镊使用说明书

【特别提示】

1. 新器械首次清洗前应进行除油处理，以免影响灭菌效果。除油方法及注意事项应参照厂家指导。

2. 器械清洗用水和灭菌蒸汽质量应符合 WS310.1 《医院消毒供应中心 第一部分：管理规范》中“10 水与蒸汽质量要求”。如果清洗用水和灭菌蒸汽质量不达标，可能会对器械造成损伤。

3. 器械使用后建议及时做预清洗处理，并尽快转运至消毒供应中心。如果必须延时清洗，应采取适当的保湿处理。

4. 应尽量避免器械长时间与卤化物接触，避免发生腐蚀。如果使用含有卤化物成分的消毒液浸泡器械，浸泡要求及注意事项应符合 WS/T 367 《医疗机构消毒技术规范》。

【产品名称】牙用镊

【型号规格】单弯，双弯，有定位，无定位，有齿，无齿，单齿，多齿，平齿，镊，直，弯：残根镊，圆头，尖头，托槽夹持镊，弯头。

【企业名称】上海荣桑医疗器械有限公司

【注册地址】上海市宝山区罗泾镇罗建路8号

【生产地址】上海市宝山区罗泾镇罗建路8号

【联系方式】电话：021-66879305 15021014913

【售后服务机构】上海市荣桑医疗器械有限公司销售部

【生产备案凭证号】沪宝食药监械生产备20182336号

【产品备案凭证号】沪宝械备20170025号

【产品性能结构及组成】

1、产品结构：

牙用镊由一对尾部叠合的叶片组成，由不锈钢材料制成。可重复使用。

2、产品性能：

A 产品的外形应整齐、对称，不应有明显的偏歪、扭曲，不应有峰棱、毛刺、裂纹等现象。

B 牙用镊的两片连接应牢固。

- C 牙用镊的唇头齿应清晰完整，不应有缺齿、烂齿的缺陷。
- D 当镊子两片啮合时，头端应对齐，无明显偏位现象。
- E 牙用镊的导向销、定位销固定应牢固，当镊子开闭时，应灵活，不应有卡塞现象。
- F 产品应有良好的耐腐蚀性能。

【适用范围】

用于口腔科检查和治疗时夹持。

【禁忌症】 -

【注意事项、警示及提示性说明】

1. 为保证器械的性能及使用寿命，严防磕碰、敲打、用力过猛及不正确使用。

2. 器械使用前要检查功能是否完好，是否有影响使用的损伤缺陷（如裂纹、变形等）。器械使用1年后，若继续使用，须在使用前加强检查，如存在问题，应进行维修或报废处理。

3. 手术使用前应进行消毒、灭菌处理，方法选择要依据 WS310.2 《医院消毒供应中心 第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》。

4. 严禁超范围使用。

【安装说明】 -

【使用说明】 -

【维护保养方法】 -

1. 牙用镊在清洗、传递、转运过程中应轻拿轻放，防止器械之间发生碰撞，以免损坏牙用镊性能部位，影响其夹持性能。

2. 牙用镊要经常检查其头部部分，以保持其夹持性能，便于使用。

3. 手术后应及时清洗消毒，防止血液等碱性液体对器械的腐蚀，延长使用寿命。

【储存条件、方法】

器械不用时，应储存在相对湿度不大于80%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。

【生产日期】 见合格证

【失效日期】 不适用。